



Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

# EMSAN® NASENSPRAY

### Medizinprodukt

Liebe Anwenderin, lieber Anwender, Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden!

#### Es enthält:

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung z\u00e4her, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entz\u00fcndlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- · Natürliches Quellsalz zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

### Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten: 1 g Mineralsalzmischung, Gereinigtes Wasser (Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20).

Emsan® Nasenspray ist garantiert frei von Konservierungsstoffen, Treibgasen und allergieauslösenden pflanzlichen Substanzen. Aufgrund der Zusammensetzung ist Emsan® Nasenspray für Schwangere und Stillende geeignet.

# **Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:**

Emsan® Nasenspray befeuchtet, reinigt und befreit die Nasenschleimhaut z. B. bei Schnupfen sowie trockener und/oder verstopfter Nase (z. B. durch Klimaanlagen, Heizungsluft oder vermehrter Staub- und Schmutzbelastung).

# Dosierungsanleitung:

Je nach Bedarf mehrmals täglich bei Kleinkindern (ab 1 Jahr) einen, bei Schulkindern zwei und bei Erwachsenen mehrere Sprühstöße Emsan® Nasenspray in jedes Nasenloch geben. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten. Wir empfehlen eine Verwendung des Emsan® Nasensprays bei Raumtemperatur.

#### **Hinweis:**

Vor der ersten Benutzung des Emsan® Nasensprays Schutzkappe abnehmen und 2 – 3× pumpen, um die Luft aus der Sprühpumpe zu entfernen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich nach jedem Gebrauch den Sprühkopf trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Sollten Sie Emsan® Nasenspray längere Zeit nicht benutzt haben, sprühen Sie den ersten Sprühstoß zur Reinigung des Adapters in die Luft. Betätigen Sie das Spray nach Anbruch regelmäßig, um einem Verstopfen der Pumpe durch Auskristallisieren von Salz entgegen zu wirken.

#### TIPP:

Die Effektivität der Anwendung kann bei Erwachsenen durch anschließendes Schnäuzen der Nase und nochmaliges Einsprühen von 1 – 2 Sprühstößen in jedes Nasenloch verbessert werden.

### Gegenanzeigen:

Bisher keine bekannt.

### **Anwendungsdauer:**



# Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind bisher keine Nebenwirkungen aufgetreten.

#### Bitte beachten:

Emsan® Nasenspray wurde ohne Konservierungsmittel in einem Spezialsprühsystem abgefüllt, daher kann es nach Anbruch bis zu 6 Monate angewendet werden.

Emsan® Nasenspray sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums verwendet werden. Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern.

# Darreichungsform und Packungsgröße:

30 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase.

## Erläuterung der Symbole:

**LOT** Charge

Verwendbar bis

Gebrauchsanweisung beachten

Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten

Nicht unterhalb 4°C und nicht oberhalb 50°C aufbewahren

Hersteller

Stand der Information: November 2019

...

 $C \in$ 

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems www.emcur.com service@emcur.com

