



**EMSAN**<sup>®</sup>  
NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

## EMSAN<sup>®</sup> KINDER HALS- UND RACHENSPRAY

Medizinprodukt zum Einsprühen in Hals und Rachen

---

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,  
Sie haben sich für ein hochwertiges, bewährtes Medizinprodukt entschieden!

**Es enthält:**

Natürliches Quellsalz zur gezielten Anwendung auf der Hals- und Rachenschleimhaut.

**Zusammensetzung:**

100 ml Lösung enthalten: 1,175 g natürliches Quellsalz (isoton gelöst), gereinigtes Wasser.  
Emsan<sup>®</sup> Kinder Hals- und Rachenspray ist garantiert frei von Konservierungsstoffen und ätherischen Ölen.

**Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:**

Emsan<sup>®</sup> Kinder Hals- und Rachenspray wird zur Befeuchtung und Reinigung der Hals- und Rachenschleimhaut und dadurch zur Linderung bei Halsschmerzen, Hustenreiz und belegter Stimme angewendet. Die komplexe Mineralstoffzusammensetzung des natürlichen Quellsalzes entfernt zähe Beläge auf rein natürlicher Basis und mindert den Säurestress der Schleimhäute. Emsan<sup>®</sup> Kinder Hals- und Rachenspray wirkt unterstützend bei starker Stimmbelastung, Schleimhauttrockenheit und Räusperzwang und kann auch bei refluxbedingten Stimmstörungen angewendet werden.

**Dosierungsanleitung:**

Kinder ab 1 Jahr: 1 bis 2 Sprühstöße, Schulkinder: 1 bis 3 Sprühstöße in den Hals- und Rachenraum sprühen. Je nach Bedarf kann diese Anwendung bis zu 12-mal täglich wiederholt werden. Dabei ist die Flasche möglichst senkrecht zu halten.

**Hinweis:**

Vor der ersten Benutzung des Emsan<sup>®</sup> Kinder Hals- und Rachensprays Schutzkappe abnehmen und 2-3 x pumpen, um die Luft aus der Sprühdose zu entfernen. Aus hygienischen Gründen empfiehlt es sich nach jedem Gebrauch den Sprühkopf trocken zu wischen und die Schutzkappe wieder aufzusetzen. Sollten Sie Emsan<sup>®</sup> Kinder Hals- und Rachenspray längere Zeit nicht benutzt haben, sprühen Sie den ersten Sprühstoß zur Reinigung des Adapters in die Luft. Betätigen Sie den Applikator nach Anbruch des Sprays regelmäßig, um einem möglichen Verstopfen der Pumpe durch Auskristallisieren von Salz vorzubeugen.

**Gegenanzeigen:**

Bitte nur bei Kindern anwenden, die in der Lage sind, während des Sprühvorgangs den Atem anzuhalten.

**Anwendungsdauer:**

Emsan® Kinder Hals- und Rachenspray kann unbegrenzt angewendet werden.

Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Kinder Hals- und Rachenspray nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

**Nebenwirkungen:**

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kam es in Einzelfällen zu Unverträglichkeiten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, konsultieren Sie Ihren Arzt.

**Bitte beachten:**

Emsan® Kinder Hals- und Rachenspray ist konservierungsmittelfrei und in einem Spezialsprühsystem abgefüllt. Dadurch können angebrochene Sprays bis zu 6 Monate nach Erstbenutzung angewendet werden. Emsan® Kinder Hals- und Rachenspray sollte nicht mehr nach Ablauf des auf der Packung aufgedruckten Verfalldatums verwendet werden.

Bitte immer außer Reichweite von Kindern lagern. Aus hygienischen Gründen sollte die Sprayflasche nur von einer Person verwendet werden.

**Darreichungsform und Packungsgröße:**

20 ml Lösung zum Einsprühen in Hals und Rachenraum.

**Erläuterung der Symbole:**

Charge



Verwendbar bis



Gebrauchsanweisung beachten



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten



Nicht unterhalb 4°C und nicht oberhalb 50°C aufbewahren



Hersteller

**Stand der Information:** 2020-05



Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH, Mainzer Str. 1c, DE-56130 Bad Ems

[www.emcur.com](http://www.emcur.com)

[service@emcur.com](mailto:service@emcur.com)

532938 2 DA

